

stampa protocollo prelievo in ordine di codice - 06/05/17 - Pag. 1		
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
CURVA GLICEMICA DA CARICO	90.26.4	CURVA DA CARICO DI CLUCOSIO DA 75 gr IN 2 PRELIEVI BASE E DOPO 2 ORE.
CURVA GLICEMICA DA CARICO	90.26.4	CURVA DA CARICO DI CLUCOSIO DA 75 gr IN 3 PRELIEVI - BASE DOPO 1 ORA E 2 ORE
PROFILO GLICEMICO (6Prel)	90.27.1	PROFILO GLICEMICO 6P
PROFILO INSULINEMICO(6Prel)	90.29.1	PROFILO INSULINEMICO 6Prel Prov.T.VIOLA 3mL
GH DOSAGGI SERIATI 5	9035101	SI ESEGUE CENTRO ANTIDIABETICO tempo 0' -30'-60'-90'-120' pr.Na/fl e siero x glic. e GH
CURVA GLICEMICA DA CARICO	90.26.4	CURVA GLICEMICA PEDIATRICA 3 PRELIEVI
UREA CLEARANCE (Cm - Cs)	90.16.4	URINE 24 H
UREA /U	90.44.1	URINE 24 H
CREATININA /dU	90.16.3	URINE 24 H

CREATININA CLEARANCE	90.16.4	URINE 24 H
CLEARANCE PERITONEALI	90.44.1	PER USO SOLO INTERNO EMODIALISI
TEST DI EQUILIBRIO PERITONEALE	90.44.1	PER USO INTERNO SOLO EMODIALISI.
EMOGASANALISI ARTERIOSA	89.65.1	SIRINGA EPARINATA 4 GRADI REFRIGERATA. Prelievo arterioso
EMOGASANALISI VENOSA	89.65.1	SIRINGA EPARINATA 4 GRADI REFRIGERATA. (PH-VENOSO) PRELIEVO VENOSO (no provetta)
EMOGASANALISI CAPILLARE	89.65.1	SIRINGA EPARINATA 4 GRADI REFRIGERATA. Prelievo capillare
OSMOLARITA' /S	9001146	non cancellare esami aggiunti Accettare cod. esame 043 o OSM (glicem + azotemia + Sodio)
OSMOLARITA' /S	9001146	ESAME SOLO PER AMANDOLA non cancellare gli esami aggiunti in automatico.
OSMOLARITA' /U	9001146	URINE DEL MATTINO

esame	c.nazion.	protocollo prelievo
OSMOLARITA' /U	9001146	URINE H 20.00
BILIRUBINA Reflex	90.10.4	BIL.Tot. REFLEX se sup a 3 esegue BIL.DIRETTA
TRANSFERRINA (capacità ferro legante)	90.42.4	OBBLIGATORIO ACCETTARE 051 SIDEREMIA E 052 TRASFERRINA
TRANSFERRINA /U	90.42.5	URINE DEL MATTINO
Ig G /S	90.69.4	immunoglobuline IgG
Ig A /S	90.69.4	immunoglobuline IgA
Ig M /S	90.69.4	immunoglobuline IgM
ALFA-1-ANTITRIPSINA	90.05.4	DAL 27/08/2014 SI ESEGUE AD ANCONA PRESSO IL LAB. ANALISI TORRETTE PROV. TAPPO ROSSO
AMMONIO /P	90.07.5	P.TAPPO VERDE REFRIGERATA
IMMUNOFISSAZIONE / S	90.69.2	immuno elettrofissazione o immunofissazione sierica in presenza di banda monoclonale

esame	c.nazion.	protocollo prelievo
VIGABATRIN	9002455	1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ELASTASI 1 PANCREATICA EIA	9004110	FECI IN FRIGO tappo bianco LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
INIBITORE C1 ESTERASI , C1 INH	90.60.1	C1 INIB. FUNZ. QUALITATIVO Prov. T.celeste.Si preleva a Fermo martedì' o giovedì' 7.30
COMPLEMENTO C3 ATTIVATORE	90.60.2	PROVETTA SIERO tappo rosso IMMUNOLOGIA ANCONA
GABAPENTIN	9002436	1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
Allergene o Ricombinante	9068105	utilizzare questo cod. con esc/1 e inserire il numero di allergeni (rich.allergologia)
GLUCOSIO-6-FOSFATO-DEIDROGENAS	90.27.2	prov. EDTA tappo viola 3ml LAB. ANALISI TORRETTE ANCONA SI ESEGUE LUNEDI O MERCOLEDI
ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME	9001101	1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB. ANALISI TORRETTE ANCONA
LISOZIMA /S	9001160	1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA

ORMONE ANTIMULLERIANO /S	9004109	LAB.ANALISI ANCONA
		Provetta Tappo Rosso SIERO
SODIO /dU	90.40.4	URINE 24 H
POTASSIO /dU	90.37.4	URINE 24 H
CLORO /dU	90.13.3	URINE 24 H
BICARBONATI	90.10.2	prelievo su siringa da emogasanalisi o p.tappo viola refrigerata.
CALCIO IONIZZATO / P/SG su	9001106	PROVETTA TAPPO VERDE REFRIGERATA
CALCIO /dU	90.11.4	URINE 24H
MAGNESIO /dU	90.32.5	URINE 24H
FOSFORO /U 24H	90.24.5	URINE 24 H
PROTEINE URINARIE/dU	90.38.5	raccolta urine 24H
PROTEINE URINARIE	90.39.1	URINE DEL MATTINO
esame	c.nazion.	protocollo prelievo

CATENE LEGGERE LIBERE (BENCE)	90.28.4	URINE DEL MATTINO
IMMUNOGLOBULINE CATENE	9001135	URINE DEL MATTINO
IMMUNOGLOBULINE CATENE LEGGERE	9001135	siero laboratorio FERMO
OSSALATI /U	90.35.3	urine 24 ore raccolta con acido cloridrico ml 10 dal 01/09/2006 ad Ancona Torr.
ACIDO VANILMANDELICO /dU	90.03.5	URINE DELLE 24h RACCOLTA CON ACIDO CLORIDRICO 35% LAB.ANALISI ANCONA
METANEFRINE /U	90.04.2	URINE 24h RACCOLTA CON ACIDO CLORIDRICO 35% L.AN.TORRETTE
ADRENALINA NORADRENALINA/du	90.04.3	URINE 24h RACCOLTA CON ACIDO CLORIDRICO 5 MOLI LABOR.ANALISI TORRETTE
DOPAMINA / U	90.18.1	URINE 24h RACCOLTA CON ACIDO CLORIDRICO 5 MOLI LABOR.ANALISI TORRETTE
ADRENALINA NORADRENALINA /P	90.04.2	2 PROVETTA EDTA refrigerata Separare e congelare LAB. ANALISI ANCONA
DOPAMINA / S	90.18.1	2 PROVETTA EDTA refrigerata Separare e congelare

		LAB. ANALISI ANCONA
CORTISOLO /U	90.15.3	URINE 24 H
ACIDO CITRICO /U	90.02.2	urine 24 ore raccolta con acido cloridrico ml 10
		ANCONA TORRETTE
FENITOINA /S	90.22.1	1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
FENITOINA /S	90.22.1	1 PROVETTA SIERO LAB. ANALISI ANCONA
ETOSUCCIMIDE /S	90.20.2	PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
CICLOSPORINA	90.13.2	dopo due ore tappo viola 3 ml
DROGHE NEI CAPELLI: OPPIACEI	9002427	ricerca eseguita su matrice cheratinica
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
DROGHE NEI CAPELLI:	9002424	Ricerca eseguita su matrice cheratinica.

DROGHE NEI CAPELLI: COCAINA	9002425	ricerca eguita su matrice cheratinica
METADONE /U	90.18.3	COD.ACC. RISERVATO SerD
ECSTASY /S	90.18.3	ESAME DA INVIARE AL LABOR. DI TORRETTE 1 PR. TAPPO ROSSO ATT. SOLO CODICE ROSA
ECSTASY /U	90.18.3	CAMPIONE DI URINE DEL MATTINO SOTTO SORVEGLIANZA si esegue ad Ancona Lab.Analis
GHB (DRD) su siero	90.18.3	1 pr.TAPPO ROSSO + 1 pr.URINA DA CONSERVARE IN CONGELATORE ACCETTARE SOLO X CODICE ROSA.
Controllo VES 2		NON ACCETTARE CONTROLLO QUALITA' ACCETTARE COD 200 (VES)
EMOCROMO	90.62.2	Provetta Tappo VIOLA
PIASTRINE conta	90.71.3	Provetta 3mL TAPPO AZZURRO
PIASTRINE conta	90.71.3	Provetta 5mL litio eparina TAPPO VERDEGIALLO
SCHIZOCITI	90.74.5	ACCETTARE ANCHE 201-EMOCROMO E 204-RETICOCITI

RETICOLOCITI	90.74.5	attenzione questo codice viene usato solo da AMANDOLA
RESISTENZA OSMOTICA	90.74.4	P.TAPPO VIOLA
AGOASPIRATO MIDOLLARE	90.63.3	VETRINI
ESAME CITOLOGICO URINE PER	91.39.4	urine in vasetto di urinocoltu Citologia FERMO + Mod.Specific 3 Camp. in giorni diversi
ESAME CITOLOGICO DI	91.39.2	ESCREATO O ESPETTORATO IN VASETTO STERILE
ESAME CITOLOGICO DI VERSAMENTI	91.39.3	CITOLOGICO VERSAMENTI VARI SPECIFICARE SULLE NOTE.
ESAME CITOLOGICO SECREZIONE	91.39.2	SECRETO MAMMARIO - CAPEZZOLO
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
Es. CITOLOGICO CERVICO	91.38.5	NON ACCETTARE PER USO INTERNO DELLA CITOLOGIA
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE	91.40.5	NON ACCETTARE PER USO INTERNO DELLA CITOLOGIA

TEMPO DI TROMBINA	90.75.5	TEMPO DI TROMBINA DILUITA(nuov
		Es. Prov. PT - Dabigratan)
		SEPARARE E CONGELARE
LUPUS ANTICOAGULANTE (LAC)	9046503	PRELEVARE 2 PROVETTE T.AZZURRO
		SI PUO' PRELEVARE IN OGNI
		PUNTO PRELIEVI DOPO ORE 8.45
EMOCROMO	90.62.2	per Dialisi
INIBITORE FATTORE VIII	90.64.3	1 provetta di Sodio Citrato
		tappo celeste da 4 ml
TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	91.08.5	DAL 29/08/2015 L'ESAME SI
		ESEGUE LAB. ANALISI ANCONA
		PROV.SIERO
LEPTOSPIRA ANTICORPI	90.96.5	1 prov.EDTA 3mlPALZZ.ARAGOSTA
		MICROBIOLOGIA ASCENSORE 2A
		V piano Ancona. Drr.sa Magi
LISTERIA ANTICORPI	9087467	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
		DAL 02/07/02
LEISHMANIA ANTICORPI EIA	90.96.1	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
EPSTEIN-BARR VIRUS VCA Ig G	91.21.1	ACCETTARE ANCHE COD 3193
		COD 3194
EPSTEIN-BARR VIRUS VCA Ig M	91.21.1	ACCETTARE ANCHE COD 3192
		COD 3194

EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA IgG	91.21.1	ACCETTARE ANCHE COD 3192
		COD 3193
PNEUMOCYSTIS CARINII RICERCA	91.06.3	BAL
		MICROBIOLOGIA ANCONA
TREPONEMA ANTICORPI TPHA/TPPA	91.10.5	Attenzione: per lo screening
		accettare 323 TMPA
		(in grav.con esenz. acc. 3231)
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI	9120108	*attenzione test di 2^ livello
		accettare al suo posto 323
TREPONEMA PALLIDUM FTA	91.10.3	Att.ne : test di 2^ livello
		accettare al suo posto 323
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
TREPONEMA PALLIDUM FTA	91.10.3	Att.ne : test di 2^ livello
		accettare al suo posto 323
TREPONEMA ANTICORPI Ig M	91.10.2	Att.ne : test di 2^ livello
		accettare al suo posto 323
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI	9120108	Att.ne : test di 2^ livello
		accettare al suo posto 323

TOXOPLASMOSI IgG AVIDITA'	9087426	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB,ANALISI TORRETTE ANCONA
ROSOLIA Ig G AVIDITA'	9087457	PROVETTA SIERO tappo rosso
		VIROLOGIA ANCONA
VIRUS HHV6 ANTICORPI IgM EIA	91.22.1	1 PROVETTA da SIERO
		VIROLOGIA ANCONA
VIRUS HHV6 ANTICORPI IgG	91.21.1	1 PROVETTA da SIERO
		VIROLOGIA ANCONA
VIRUS CITOMEGALOVIRUS	9087430	PROVETTA SIERO
		Sierologia Fermo
BORRELIA BURGD BURGDORFERI	90.87.5	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
RICKETTISIA RICKETTSIAE	91.06.5	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
RICKETTISIA RICKETTSIAE	91.06.5	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
COXIELLA BURNETI ANTICORPI	91.06.5	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA	90.90.1	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS	9083313	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA

CLOSTRIDIUM TETANI ANTICORPI	9087406	PROVETTA SIERO
		LAB.ANALISI ANCONA TORRETTE
CORYNEBACTERIUM DIFTERIAE	9087407	PROVETTA SIERO ESEGUITA IN
		ANCONA PRESSO LAB.ANALISI
		TORRETTE 01/03/03
ANTICORPI ANTI MAG (Myelin	90.51.3	PROVETTA SIERO
		LAB.ANALISI ANCONA TORRETTE
		MAG + GANGLIOSITI (anti nervo)
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
ANTICORPI ANTI GM1	9047305	PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI ANCONA TORRETTE
		MAG 354+gangliositi 3540
Ant. Nucleari Estraibili (ENA)	9047307	codice modificato chiamare
		dott.ssa Moriconi
LIVER PROFILE 10Ag	9047307	ESAME DI II LIVELLO
		NON ACCETTARE DA REPARTO O IN
		AMBULATORIO
Sclerodermia dot	9047311	ESAME DI II LIVELLO
		NON ACCETTARE DA REPARTO O

		IN AMBULATORIO
ANA Profile 10Ag	9047307	ESAME DI II LIVELLO
		NON ACCETTARE DA REPARTO O
		IN AMBULATORIO
ANCA+GMB DOT	90.48.2	ESAME DI II LIVELLO
		NON ACCETTARE DA REPARTO
		O IN AMBULATORIO
FATTORE INTRINSECO Ab	90.48.1	Si esegue al Lab. di Fermo
		prov. siero tappo rosso
		dal 2015 Virologia Fermo
IgG ANTICORPI ANTI GLIADINA	90.49.5	LABORATORIO ANALISI ANCONA
		1pr SIERO TAPPO ROSSO
TSH CURVA DA STIMOLO TRH	90.42.2	CENTRO ANTIDIABETICO
		pr. siero tempo 0'-15'-30'-60'
		SOMMINISTRARE FARMACO
CORTISOLO /S	90.15.3	CENTRO ANTIDIABETICO pr.siero
		h 23.00 ASSUMERE 2 cp DECATRON
		da 0.5 mg ore 8.00 prelievo.
OSTEOCALCINA	90.35.4	pr.litio-eparina tappo verde
		REFRIGERATA DAL 15/12/14
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA	90.54.4	ATTENZIONE: accettare anche
		il cod.4350
		oppure accettare con ATA

T.S.I.	90.53.5	SOSTITUISCE IL 4351 (Ab TSH)
		DAL 23/09/2016
BETA 2 MICROGLOBULINA /U	90.10.1	URINE della mattina
ANTI-HBc Ig M	91.18.1	accettare HbcAb (cod.442)
		l'esame HbcAb M verra'inserito
		dal Lab se HbsAg positivo
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
HCV RIBA (CONFERMA)	91.20.1	ESAME NON ESEGUIBILE CON
		QUESTO CODICE DIGITARE
		IL Cod. 44841
LIQUIDO SEMINALE ESAME	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE
SCREENING RISCHIO PRENATALE	9043102	PROVETTA SIERO PRESSO L.ANALIS
		ANCONA OCCORRE CONSENSO FIRMATO
		DAL PAZ. E ALLEGATO GINECOLOGO
SCREENING RISCHIO PRENATALE	9004122	PROVETTA SIERO X L.AN ANCONA
		PIU' CONSENSO INFORMATO E ALLE-
		GATO DEL GINECOLOGO
GLUCAGONE CURVA (max 4)	9004111	CENTRO ANTIDIABETICO
		GLICEMIA + C-PEPTIDE DI BASE

		E DOPO 6'(farmaco Glucagen)
TEST al GLUCAGONE per GH	90.27.1	SI ESEGUE CENTRO ANTIDIABETICO
		Glicemia + GH tempo 0' dopo 6'
		minuti
TEST CARICO SALINO	90.40.2	SI ESEGUE AL C.TRASFUSIONALE
		renina e aldosterone tempo 0'
		e dopo 240' in orto.
MICOBATTERI MICROSCOPICO	91.02.4	INDICARE TIPO DI MATERIALE
		INVIATO SU APPOSITA SCHEDA
		MICROBIOLOGIA TORRETTE ANCONA
PLASMODI MALARIA RICERCA	91.05.5	VETRINI + P.TAPPO VIOLA
LEISMANIA RICERCA MICROSCOPICA	91.05.5	Vetrino di biopsia epatica e/o
		aspirato midollare
CAVO ORALE	90.93.5	CAVO ORALE
		1 TAMPONE SENZA GEL
		ATT. SOLO X CODICE ROSA
CAVO ORALE	90.93.5	CAVO ORALE 1 T.SENZA GEL
		DA CONSERVARE IN CONGELATORE
		ATT. SOLO X CODICE ROSA
TAMPONE CUTE	90.93.5	TAMPONE CUTE 1 T. CON GEL
		DA CONSERVARE IN CONGELATORE
		ATT. SOLO X CODICE ROSA
GARDNERELLA URETRALE ESAME	90.86.3	RICERCA GARDNERELLA
		SU TAMPONE VAGINALE

GARDNERELLA URETRALE ESAME	90.86.3	RICERCA GARDNERELLA SU TAMPONE URETRALE
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
RICERCA DNA Tampone Vaginale	91.03.5	RICERCA DNA (DA CONSERVARE IN CONGELATORE)1 TAMP.SENZA GEL ATT. ACCETTARE X CODICE ROSA
RICERCA SPERMATOZOI SU TAMPONE	90.31.4	RICERCA SPERMATOZOI T.VAGINALE 1 TAMPONE SENZA GEL ATT. ACCETTARE X CODICE ROSA
COLTURALE LIQUIDO PLEURICO	90.93.3	COLTURALE PLEURICO
COLTURALE LIQUIDO PERITONEALE	90.93.3	COLTURALE PERITONEALE
COLTURALE LIQUIDO ASCITICO	90.93.3	COLTURALE ASCITICO
LIQUIDO ASCITICO	90.30.4	LIQUIDO ASCITICO
LIQUIDO DA DIALISI PERITONEALE	90.30.4	LIQUIDO PERITONEALE
LIQUIDO SINOVIALE ESAME C/F/M	90.32.1	LIQUIDO SINOVIALE
MICOBATTERI IN CAMPIONI	91.02.3	INDICARE TIPO DI MATERIALE

		INVIATO SU APPOSITA SCHEDA
		MICROBIOLOGIA TORRETTE ANCONA
CISTI PANCREATICA	90.30.4	CISTI PANCREATICA
		SI RICERCA PROTEINE -GLUCOSIO-
		AMILASI E CEA
CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA	91.11.5	CHLAMYDIA OCULARE PCR FERMO
		PROVETTA TAPPO CELESTE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA	91.11.5	CHLAMYDIA SPERMA PCR
		FERMO - BIOLOGIA MOLECOLARE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA	91.11.5	urine del mattino prima minz.
		CAMPIONE STERILE almeno 10 ml
		MICROBIOLOGIA FERMO met.PCR
MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA PCR	91.11.5	urine del mattino prima minz.
		CAMPIONE STERILE PIENO
		MICROBIOLOGIA FERMO met.PCR
LEGIONELLA ANTIGENE /U	90.85.3	*** CAMPIONE URINA ***
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	90.85.3	*** CAMPIONE URINA ***
MYCOPLASMI GENITALI MULTIPLEX	91.11.5	MICOPLASMA SPERMA
		si esegue a Fermo Microbiologi
TAMPONE RETTALE	90.93.5	TAMPONE RETTALE PER RICERCA
		SPERMATOZOI 1 TAMP.SENZA GEL
		ATT. SOLO X CODICE ROSA

esame	c.nazion.	protocollo prelievo
TAMPONE RETTALE	90.93.5	TAMP.RETTALE RICERCA DNA 1 T.SENZA GEL DA CONSERVARE IN CONGELATORE. SOLO CODICE ROSA
HE4 (Human epididimys protein	9002429	PROVETTA SIERO LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ANTIGENE CA 72-4	90.56.1	PROVETTA SIERO tappo rosso LAB. ANALISI TORRETTE ANCONA
ANTIGENE POLIPEPTIDICO	90.56.4	SIERO PER ANCONA LAB.ANALISI TORRETTE
TELOPEPTIDE C-TERMINALE S	9004127	Pr.T.ROSSO x ANCONA ex CrossL Se richiesto monitoraggio pre- lievo sempre alla stessa ora.
PARASSITI DOPO CONC O ARRICC	91.05.4	ricerca parassiti (Schistosoma su urine.
VIRUS ADENOVIRUS ANTIGENI	9112601	FECI
PARASSITI CISTI feci	91.05.4	FECI
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA	90.91.1	Da eseguire esclusivamente su feci liquide

HELICOBACTER PYLORI FECALE	90.85.3	FECI
		se prelevate il giorno prima
		conservare in congelatore.
RICERCA LEUCOCITI	9068103	FECI
COLTURALE LIQUIDO SINOVALE	90.93.3	COLTURALE SINOVALE
ESAME CHIMICO FISICO LIQUOR	9001137	LIQ. CEFALORACHIDIANO
FLUIDO CEREBROSPINALE (FCS)	9112603	LIQ. CEFALORACHIDIANO
		PANNELLO PER BATTERI VIRUS
		LIEVITI
COLTURALE LIQUOR CEFALO	90.93.3	COLTURALE LIQUOR
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS	9083313	SU LIQUOR
LIQUOR BANDE OLIGOCLONALI	9001136	PROVETTA LIQUOR
		LABORATORIO ANALISI TORRETTE
		ANCONA
CRIPTOCOCCO INK TEST	90.98.5	LIQUOR
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA CD3	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		parziale

esame	c.nazion.	protocollo prelievo
TIPIZZ. LINFOCI. CD3/CD19/NK	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		routin accettazione est.
TIP CD3	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		routin accettazione est.
TIP CD4	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		routin accettazione est.
TIP CD45	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		routin accettazione est.
TIP CD56	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		routin accettazione est.
TIP CD19	90.81.5	PROVETTA CON EDTA
		OBBLIGATORIO ESEGUIRE EMOCROMO
		routin accettazione est.
FENOTIPO RH	90.64.4	PROVETTA T.VIOLA
		X CENTRO TRASFUSIONALE
		solo su prenotazione
VIRUS HIV 1 e 2 ANTICORPI	91.22.5	ESAME NON ESEGUIBILE CON

		QUESTO CODICE DIGITARE
		Cod. 70321
VIRUS HIV 1 e 2 ANTICORPI	91.22.5	ESEGUITO AL LAB.ANALISI FERMO
DNA ANALISI PER MUTAZIONE HFE	9129224	1 PROV.EDTA tappo viola 6ml
		LAB. ANALISI TORRETTE ANCONA
CRIOGLOBULINE TOTALI RICERCA	90.61.1	PRELIEVO DA ESEGUIRE PRESSO
		L'AMBULATORIO C.TRASFUSIONALE
		POLIAMBULATORIO FERMO EX INAM
AGGLUTININE A FREDDO	90.46.3	PRELIEVO DA ESEGUIRE PRESSO
		L'AMBULATORIO C.TRASFUSIONALE
		POLIAMBULATORIO FERMO EX INAM
TEST DI COOMBS INDIRETTO	90.49.3	CENTRO TRASFUSIONALE
		provetta tappo rosso senza gel
TRICHINELLA SPIRALIS ANTICORPI	9087427	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ACTH TEST	9015201	COMPRENDE CORTISOLO E 17HO PRO
		GESTERONE tempo 0'-30'-60'
		pr.siero/NaCt L.A.ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo

ACTH CURVA DOPO STIMOLO	9015201	COMPRENDE CORTISOLO tempo 0' dopo 30' e dopo 60'
ACTH TEST (17-OH-Progesterone)	9004119	COMPRENDE 17OH PROGESTERONE tempo 0'- dopo 30' e dopo 60' DAL 04/04/2013 ANCONA
PROLATTINA /S	90.38.2	dopo un ora con ago canula a dimora
PROLATTINA CURVA DOPO TRH	90.38.3	DOPO STIMOLO TRH SI ESEGUONO 4 PRELIEVI TEMPO 0 - 30 - 60 90 MINUTI CON INFUSIONE
ADENOVIRUS ANTICORPI FC	91.12.4	provetta siero VIROLOGIA AN
COXSACKIE VIRUS	91.16.2	PROVETTA SIERO tappo rosso VIROLOGIA AN
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE	91.26.2	PROVETTA SIERO tappo rosso VIROLOGIA ANCONA DAL 09/06/05
INSULINA /S	90.29.1	prov.EDTA 3 ml tappo viola
INSULINA /S (post prandiale)	90.29.1	INVIARE LAB. FERMO Prv. 3mL EDTA Tappo Viola
CURVA INSULINEMICA	90.28.5	CURVA INSULINEMICA 3 prelievi EDTA TAPPO VIOLA PEDIATRICA

C-PEPTIDE /S	90.11.1	PROVETTA SIERO
		LAB ANALISI FERMO
		DAL 01/12/98
C-PEPTIDE /S	90.11.1	PROVETTA SIERO
		LAB ANALISI FERMO
		POST PRANDIALE
ANTICORPI NEURONALI ANTI-HU	9054403	PROVETTA SIERO
		SIEROLOGIA TORRETTE ANCONA
ANTICORPI NEURONALI ANTI-RI	9054402	PROVETTA SIERO
		SIEROLOGIA TORRETTE ANCONA
VIRUS HHV8 IgG	91.22.1	1 PROVETTA DA SIERO
		VIROLOGIA ANCONA
HERPES VIRUS 8 DNA (HHV8)	9122301	1 PROVETTA DA EMOCROMO 6 ml
		VIROLOGIA ANCONA
e5 - Forfora di cane	9068105	QUESTO ESAME E' LEGATO
		ALL'e5 (forfora di cane)
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
e3 - Forfora di cavallo	9068105	PROVETTA SIERO
		INVIARE AD ANCONA

		LABORATORIO ANALISI TORRETTE
forfora di cane	9068105	QUESTO ESAME E' LEGATO
		ALL'e2 (epitelio di cane)
c7 - Cefaclor	9068105	PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
VITAMINA B2 /P	90.45.1	1 PROVETTA EDTA P.Tappo VIOLA
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
		Prel. LUNEDI MERCOLEDI
PROPAFENONE	9002437	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ACIDO LATTICO /P Sg	90.02.5	P.TAPPO GRIGIO
		tenuta in posizione verticale
		tappo in alto e in GHIACCIO !
SOMATOMEDINA IGFBP S	9004125	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB. ANALISI TORRETTE ANCONA
IgG SOTTOCLASSI Ig G1	90.68.4	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
IgG SOTTOCLASSI Ig G2	90.68.4	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
IgG SOTTOCLASSI Ig G3	90.68.4	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
IgG SOTTOCLASSI Ig G4	90.68.4	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA

5 OHINDOLACETICO Es. AN		non eseguibile digitare
		serotonina urinaria cod.966 e
		cromogranina A cod.9612
INTERFERONE	90.70.1	ESAME NON ESEGUIBILE !!!!!!!
		NON DOVETE ACCETTARLO!!!!!!!!!!
		CAPITO MI HAI
TEICOPLANINA	90.08.3	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
ANTIGENE SCC	90.57.1	PROV. SIERO T.ROSSO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
FARMACI ANTITUMORALI Es.X AN	90.20.5	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
LEVETIRACETAM	9002441	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
SIROLIMUS / Sg	9002450	1 PROV.EDTA tappo viola 3ml
		Prelevare a Fermo martedì o
		giovedì ore 7.30 Lab. Ancona

VITAMINA B1 /P	90.45.1	1 PROVETTA EDTA P.Tappo VIOLA
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
		Prel. LUNEDI MERCOLEDI
VITAMINA B6 /P	90.45.1	1 PROVETTA EDTA 3mL T.VIOLA
		PLASMA INTERO INVIARE AL
		LAB. TORRETTE ANCONA
FANS Es.ANCONA	90.20.4	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
LIQUOR BANDE OLIGOCLONALI	9001136	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		PRESSO IL LABORATORIO ANALISI
		TORRETTE ANCONA
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI	90.88.1	PROV. LIQUOR
		PRESSO L.ANALISI TORRETTE
VIRUS NEUROTROPI	91.22.1	PROVETTA LIQUOR
		VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI	90.88.1	PROVETTA SIERO tappo rosso
		PRESSO L.ANALISI TORRETTE
		ABBINATA AL LIQUOR
VIRUS NEUROTROPI	91.22.1	PROVETTA SIERO singola da 6ml
		VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
TOPIRAMATO	9002430	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
VITAMINA C /P	90.45.1	1 PROVETTA EDTA 3mL T.VIOLA
		CENTRIFUGARE inviare PLASMA

		LAB. TORRETTE ANCONA
VITAMINA A /P	90.45.2	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
VITAMINA E /P	90.45.2	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
ACIDO MICOFENOLICO	9021201	1 PROV.EDTA tappo viola 3ml
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ENTAMOEBA HISTOLYTICA	90.92.4	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
AMIKAVINA GENTAMICINA	90.08.3	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
CARDIACI: AMIODARONE-LIDOCAINA	90.20.3	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB. ANALISI TORRETTE ANCONA
ASCARIS LUMBRICOIDES ANTICORPI	9087472	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
CLOZAPINA	90.09.4	PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA

ANTICORPI ANTI ASPERGILLO	90.97.2	LABORATORIO ANALISI ANCONA
		1pr SIERO TAPPO ROSSO
FILARIA ANTICORPI	9087427	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
OXACARBAZEPINA	90.09.4	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
SIERO AMILOIDE Es ANCONA	90.75.1	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
HPV BIOLOGIA MOLECOLARE	91.37.1	TAMPONE VAGINALE
		LABORATORIO ANALISI Fermo
		Citologia
HPV BIOLOGIA MOLECOLARE	91.37.1	URINE VASETTO URINOCOLTURA
		LABORATORIO ANALISI Fermo
		Citologia
HPV BIOLOGIA MOLECOLARE	91.37.1	TAMPONE URETRALE
		LABORATORIO ANALISI Fermo
		Citologia
HPV BIOLOGIA MOLECOLARE	91.37.1	LIQUIDO SPERMATICO
		LABORATORIO ANALISI Fermo
		Citologia
HPV BIOLOGIA MOLECOLARE	91.37.1	TAMPONE
		LABORATORIO ANALISI Fermo
		Citologia

TRIPTASI	9047332	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		SEPARARE E CONGELARE
		LAB.AN.TORRETTE ANCONA
IgA SECRETORIE SALIVARI	90.67.5	1 VASETTO STERILE
		RACCOLTA SALIVA
		LAB. ANCONA
VIRUS INFLUENZA A IG IM	9087449	PROVETTA SIERO tappo rosso
		VIROLOGIA ANCONA
VIRUS INFLUENZA B IG IM -	9087450	PROVETTA SIERO tappo rosso
		VIROLOGIA ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
VIRUS PARAINFLUENZA VIRUS 1,	91.13.1	PROVETTA SIERO tappo rosso
		VIROLOGIA ANCONA
INTERLEUCHINA 6 /S	9004114	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
ANTICORPI ANTI CUTE	90.52.5	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
ISOLATOR PER MICOBATTERI	91.02.3	PROVETTA DEDICATA DA RITIRARE
		E INVIARE AL Dr.PIERSIMONI

		MICROBIOLOGIA TORRETTE AN
Parvovirus DNA sangue intero	9122301	1 PROVETTA T.VIOLA EDTA 6 ml
		VIROLOGIA ANCONA
		metodo DNA
ANTICORPI ANTI PIASTRINE	9053201	si esegue solo su prenotazione
		1 provetta litio eparina verde
		Med.Trasfusionale Ancona
QUANTIFERON TB	9054401	Allegare modulo compilato dal
		medico a mantoux eseguita.X AN
		Microb.drPiersimoni P.dedicate
MITOGENO		Allegare modulo compilato dal
		medico a mantoux eseguita.X AN
		Microb.drPiersimoni P.dedicate
ANTICORPI ANTI PIASTRINE ADESE	9053202	SI ESEGUE SOLO SU PRENOTAZIONE
		PROVETTA DEDICATA DA PRENDERE
		PRESSO LA SEGRETERIA DEL L.A.
DNA ANALISI PER MUTAZIONE	9129201	1 PROVETTA EDTA 3mL T.Viola
		dal 05/05/2009 lab.Fermo
FARMACI ANTIPSICOTICI Es.X AN	9002435	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ANTICORPI NEURONALI ANTI-YO	9054401	1 PROVETTA DA SIERO
		LABORATORIO ANALISI ANCONA
ANTICORPI ANTI CENTROMERO	9047302	digitare ANA cod.407
		L'ESAME E' COMPRESO NEGLI

		ANTICORPI ANTI NUCLEO
TACROLIMUS / Sg	9002450	PROVETTA DA EMOCROMO
		LAB.ANALISI FERMO dal 10/04/07
LAMOTRIGINA	9002441	PROVETTA DA SIERO O LITIO-EPAR
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
		REP TOSSICOLOGIA
PRIMIDONE /S	90.37.5	PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
SEROTONINA /S	9004124	PROVETTA SIERO SENZA GEL.
		INVIARE CONGELATA L.A.TORRETTE
		ANCONA
RENINA CLINOSTATICA /S	90.40.2	UNA provetta con EDTA da 6 ml.
		TEMPERATURA AMBIENTE si puo'
		prelevare in tutti i punti prel
RENINA ORTOSTATICA /S	90.40.2	UNA provetta con EDTA da 6ml
		TEMPERATURA AMBIENTE si puo'
		eseguire in tutti i punti prel
GASTRINA /S	90.26.1	PROVETTA SIERO

		LAB ANALISI TORRETTE
		ANCONA
HBV DNA QUANTITATIVO	91.17.4	PROVETTA EDTA T.Viola 6mL
		LABORATORIO ANALISI FERMO
		DAL 02/07/2008
HCV RNA QUANTITATIVO	91.19.4	PROVETTA EDTA T.Viola 6mL
		LABORATORIO ANALISI FERMO
		DAL 05\03\2000
HDV ANTICORPI TOTALI	91.20.3	PROVETTA SIERO singola da 6 ml
		VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
HCV GENOTIPO	9129233	1 PROVETTE EDTA EMOCROMO
		LABORATORIO FERMO
HIV 1 RNA QUANTITATIVA PLASMA	9112614	PROVETTA CON EDTA
		LABORATORIO ANALISI FERMO
		HIV RNA
HIV FARMACO-RESISTENZA	9112612	PROVETTA CON EDTA da 6 ml
		Consegnare in giornata
		VIROLOGIA ANCONA
VIRUS HTLV 1-2 DNA	91.11.5	PROVETTA SIERO tappo rosso
		VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
ANTICORPI ANTI-C1q PRECIPITINA	90.60.1	PROVETTA SIERO
		MED.LAVORO TORRETTE ANCONA
Anti-Virus Zika IgG	9087461	PROVETTA SIERO
		VIROLOGIA TORRETTE ANCONA

Anti-Virus Zika IgM	9087461	PROVETTA SIERO
		VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
17 OH-PROGESTERONE	90.01.2	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
17 OH-PROGESTERONE	90.01.2	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
ERITROPOIETINA /S	90.18.5	DAL 09/02/07 SI ESEGUE A FERMO
		prov. 5ml tappo verde
		Litio-eparina
ANTICORPI ANTI-GAD / S	9047304	L'ESAME SI ESEGUE IN ANCONA
		LAB.ANALISI TORRETTE
		1 PROVETTA SIERO tappo rosso
CROMOGRANINA A /S	9004109	PROVETTA SIERO
		da CONGELARE
		LAB. ANCONA
INIBINA B /S	9004109	PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA

SEROTONINA /U	9004124	ESAME ESEGUITO LAB ANALISI
		TORRETTE URINE 24 h CON
		ACIDO CLORIDRICO
COPROPORFIRINE /U	90.14.5	URINE 24 ORE CONTENITORE SCURO
		CON 10 CC AC.CLORIDRICO
		LAB.ANALISI ANCONA
OMOCISTEINA P	9004116	Prov.dedicata da chiedere al
		LAB. ANALISI PR.KABE da 3.5 ml
		si esegue anche nei distretti
CISTATINA C	9001109	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
CERULOPLASMINA	90.12.5	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
COMPLEMENTO TOTALE CH 100	9047318	PROVETTA SIERO IMMUNOLOGIA
		ANCONA
INIBITORE C1 ESTERASI , C1 INH	90.60.1	PROVETTA SIERO-IMMUNOLOGIA
		TORRETTE ANCONA. SE RICHIESTO
		IL funzionale + 1 pr. plasma.
ANTICORPI ANTI RECETTORI	9047308	PRELEIVO LUNEDI MERCOLEDI
		dal 18/06/2012 si esegue
		LAB.ANALISI TORRETTE AN
ANTICORPI RECETTORI	9047308	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA	90.78.4	1 prov. EDTA tappo viola 3ml

		Prelevare lunedì' o mercoledì'
		Immunologia Torrette
TIPIZZAZIONE HLA-B51	90.57.3	1 prov.EDTA tappo viola 3ml
		Prelevare lunedì' o mercoledì'
		Immunologia Torrette
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA HLA	90.81.3	2 PROV. 2 gg. EPARINA
		1 PROV. T. VIOLA EDTA
		CON PRENOTAZIONE - IMM. ANCONA
TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DR	90.80.5	Prov.T.VIOLA EDTA
		Prelevare lunedì' o mercoledì'
		Immunologia Torrette
DNA ANALISI PER RICERCA	9128210	1 prov.EDTA tappo viola 3ml
		Prelevare lunedì' o mercoledì'
		Immunologia Torrette
TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA	90.78.4	1 prov.EDTA tappo viola 3ml
		Prelevare lunedì' o mercoledì'
		(solo per HIV POSITIVO)IMM.AN
PIOMBO /S	90.36.3	1 prov.EDTA tappo viola 3 ml
		Prel. LUNEDI MERCOLEDI

		LAB.ANALISI AREA CROMATOGRAFIA
ESANDIONE 2,5 /U	9002428	PROVETTA URINA dell'ultimo giorno lavorativo - prendere un campione refrigerato.
CITOMEGALOVIRUS DNA SIERO	91.11.5	PROVETTA EDTA singola da 6 ml VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
CITOMEGALOVIRUS DNA URINE	91.11.5	URINE DEL MATTINO VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
ANTI-ECHOVIRUS PNEUMOTROPI	91.13.1	PROVETTA SIERO tappo rosso VIROLOGIA AN
VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI	91.25.4	PROVETTA SIERO tappo rosso 6ml VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI	91.25.4	PROVETTA SIERO tappo rosso 6ml VIROLOGIA TORRETTE ANCONA
ADIURETINA/PROVASOPRESSINA/COP	90.04.1	sostituisce ADH 1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
CAMPYLOBACTER JEJUNI ANTICORPI	9087471	PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
CAMPYLOBACTER RICERCA	90.88.5	LABORATORI ANALISI di FERMO Cont. FECl
YERSINIA ENTEROLITICA	9087464	1 PROVETTA SIERO tappo rosso LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA

SHIGELLA ANTICORPI FC	9087421	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
esame	c.nazion.	protocollo prelievo
ANTICORPI TOXOCARA CANIS IgG	91.09.3	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETE ANCONA
		SIEROLOGIA Dr.Ciarrocchi
SHBG	9004107	PROVETTA SIERO TAPPO ROSSO
		Lab.Anal. Fermo
FARMACI SEDATIVI Es. ANCONA	90.09.4	1 PROVETTA SIERO tappo rosso
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
ORMONE SOMATOTROPO	9035101	PROVETTA SIERO-LAB.ANAL.FERMO
		5 PROVETTE DA SIERO
		tempo 0'-30'-60'-90'-120'
GH DOSAGGI SERIATI 5 con	9035101	SI ESEGUE centro Antidiabetico
		(Clonidina) pr.tap.rosso siero
		tempo 0'-30'-60'-90'-120'
GH DOSAGGI SERIATI 5 CON	9035101	VIENE ESEGUITO in PED. e CAD.
		(arginina)pr.tappo rosso siero
		tempo 0'-30'-60'-90'-120'

ALDOSTERONE CLINO /S	90.05.3	paz. in posizione clino
		provetta siero
ALDOSTERONE ORTO /S	90.05.3	paz.in ortostatismo
		provetta siero
ALDOSTERONE URINARIO /dU	90.05.3	PROVETTA URINE 24h
		LAB. ANALISI FERMO
EVEROLIMUS (Es.ANCONA)	9002450	1 PROV. EDTA tappo viola 3 ml
		LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
AMILASI SALIVARE	90.06.5	accettare su profili:SAM o
		aggiungere cod:123 e 994
		prov:tappo VerdeGiallo
FOSFATASI ALCALINA	90.63.4	4/5 VETRINI STRISCIATI DI SAN-
		GUE PERIFERICO SENZA FISSAGGI.
		LAB.ANAL.TORRET. S. EMATOLOGIA
PROTEINA C ANTICOAGULANTE	90.72.1	1 PROVETTE DI SODIO CITRATO
		ESEGUIRE PRELIEVO PRESSO
		AMBULATORIO DI FERMO
PROTEINA S FUNZIONALE METODO	9046504	1 PROVETTA DI SODIO CITRATO
		ESEGUIRE PRELIEVO PRESSO
		AMBULATORIO DI FERMO
APC RESISTENCE	90.77.2	1 PROVETTA NA- CITRATO
		ESEGUIRE PRELIEVO PRESSO
		AMBULATORIO DI FERMO

esame	c.nazion.	protocollo prelievo
DNA ANALISI PER MUTAZIONE ARG	9129203	1 PROVETTE EDTA 3mL T. Viola LAB. FERMO Biologia Molecolare 26-03-08
DNA ANALISI PER MUTAZIONE G202	9129204	1 PROVETTA EDTA 3mL T.Viola LAB. ANALISI - FERMO - Biologia Molecolare 26-03-08
PCR JAK2-MUTAZIONE V617F (M)	9129242	compilare allegato in ogni sua parte dal medico 1 pr.EDTA 3ml L.A.ANCONA Martedi e Giovedi
IgGTRANSGLUTAMINASI	9047315	LABORATORIO ANALISI ANCONA 1 pr SIERO TAPPO ROSSO
TRANSFERRINA RECETTORE	9001156	UNA PROVETTA SIERO LAB.ANALISI TORRETTE ANCONA
PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI	9068102	SIERO LAB.ANALISI ANCONA PREL.MARTEDI E GIOVEDI A FERMO centr.1h e entro 2h dal prel.